


1 전원 켜기

- 가방의 주황색 손잡이를 당겨 가방을 열고, Lazaro 본체의 Power 버튼을 1초 이상 눌러 전원을 켜세요.
- 이때, 보조자는 환자에게 CPR을 실시하세요.

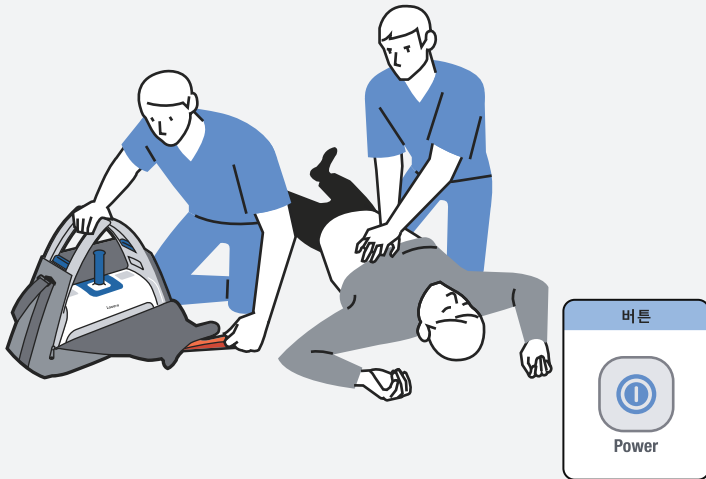


2 등판 배치하기 / 본체의 다리 회전하기

- 등판을 꺼내 환자의 몸통 아래 놓고, 압박할 흉부 아래에 등판의 중앙이 오도록 배치하세요. 배치가 끝나면 CPR을 계속 실시하세요.
- Lazaro 본체를 가방 위에 얹힌 후, 다리를 반대 방향으로 회전하여 고정시키세요.




3 본체와 등판 연결하기

- 다리의 손잡이를 잡고 들어올려 등판에 결합하세요. '짹' 소리가 나면 결합된 것입니다.
- 결합이 잘 되었는지 손잡이를 잡고 제품을 살짝 들어 확인하세요.

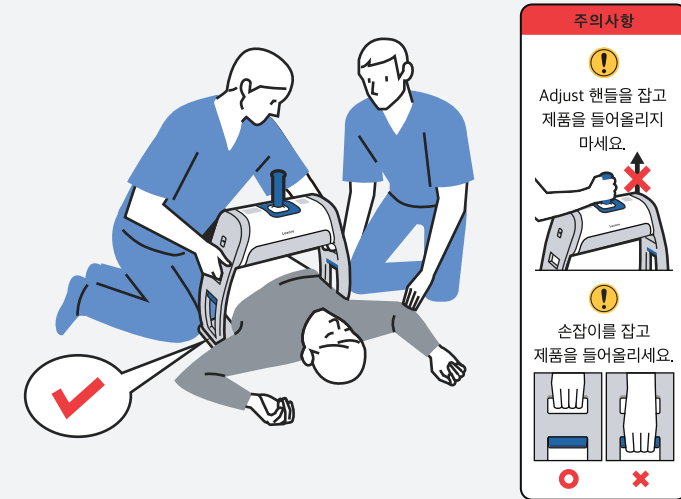

4 압박 위치 조정하기

- Adjust 핸들의 버튼을 누른 상태에서 압박할 위치를 조정하세요.
- Adjust 버튼을 누르고 있는 동안에만 압박 위치를 조정할 수 있습니다.
- 가이드 레이저를 통해 압박할 위치를 확인할 수 있습니다.

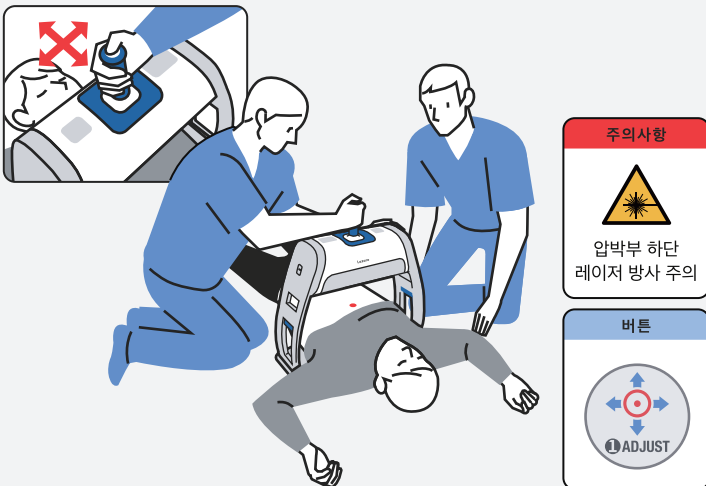

5 압박 모듈 장착하기 / 압박부 SET 하기

- 본체 커버를 열어 기본 연장기를 꺼낸 후 설치하고, Set 버튼을 눌러 압박을 준비하세요.
- 흉부 높이가 높아 기본 연장기 설치 공간이 부족할 경우 압박부 커버를 압박부에 씌우세요.
- 흉부 높이가 낮아 Set 동작이 완료되지 않을 경우 긴 연장기로 교체하세요.



6 CPR 모드 실행하기 / 종료하기

- PLAY 버튼(30:2 또는 무한 압박 모드)을 눌러 압박을 시작하세요.
- 필요 시 핸드 스트랩을 사용해 환자 손을 본체 다리에 고정하세요.

